

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕРБАЛЭЙД» (ООО «ВЕРБАЛЭЙД»)**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«ЗВУКАРИК. НЕРЕЧЕВЫЕ ЗВУКИ»**

Версия документа: 1.0.0

Москва, 2026

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Термины и сокращения.....	3
3. Установка мобильного приложения «Звукарик»	3
4. Вход и регистрация в системе	4
5. Главный экран и навигация	5
6. Работа с Личным кабинетом логопеда.....	6
7. Режим «Обучение»	9
8. Режим «Тестирование» и сохранение результатов	11
9. Что делать, если возникла ошибка или вопрос	12
10. Правовая информация и контакты правообладателя	13

1. Общие сведения

В данном руководстве описано, как работать с мобильным приложением и веб-сервисом **«Звукарик. Неречевые звуки»** (далее — **«Звукарик»**).

Программа предназначена для развития фонематического слуха и слухового внимания у детей в возрасте **от 1,5 года и старше**.

Приложение используется:

- **Логопедами и коррекционными педагогами** — для проведения очных и онлайн-занятий с детьми, вести учет учеников и составлять для них индивидуальные траектории развития;
- **Родителями** — для самостоятельных развивающих занятий с ребенком в домашней обстановке.

2. Термины и сокращения

«Звукарик» / ПО – программное обеспечение (мобильное приложение и веб-версия).

Неречевые звуки – звуки окружающего мира (бытовые шумы, звуки природы, животных, транспорта и т.д.), не относящиеся к человеческой речи.

Фонематический слух – способность человека слышать, узнавать и различать звуки.

Конструктор звуков – функция приложения, позволяющая пользователю вручную собрать собственный набор звуков для урока.

Ученик - профиль ребенка, созданный логопедом для персональных занятий и сохранения результатов.

3. Установка мобильного приложения «Звукарик»

Приложение «Звукарик» доступно на различных устройствах:

1. **Для мобильных устройств (Android / iOS):** приложение «Звукарик. Неречевые звуки» представлено в магазинах приложений RuStore и App Store, после нахождения приложения нажмите **«Установить»**.

2. Для работы на компьютере или планшете через браузер (Веб-сервис): откройте любой современный браузер (Chrome, Яндекс.Браузер, Safari) и перейдите по адресу: <https://zvukariknz.verbalaid.ru>

Системные требования: наличие подключения к сети Интернет, динамики или наушники для воспроизведения звука, минимальное интернет-соединение от 1 Мбит/с для стабильной загрузки аудио/картинок. Для мобильных устройств — Android 9.0+ / iOS 13.0+, требуемый объем свободного места на устройстве до 70 Мб.

4. Вход и регистрация в системе

1. Откройте приложение или веб-сайт.
2. На экране авторизации введите вашу **Почту** (email) и **Пароль**.
3. Нажмите кнопку **«Войти»**.
4. Если вы используете сервис впервые, нажмите кнопку **«Создать профиль»** и создайте аккаунт, введя **Почту** (email) и **Имя**.

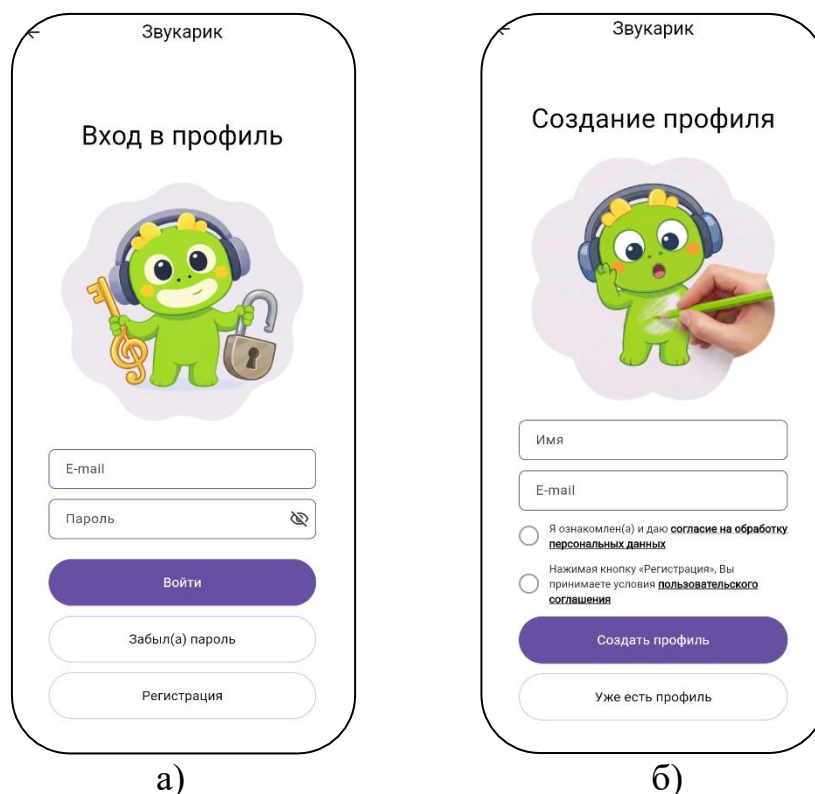


Рисунок 1 – а) экран Входа и б) Регистрации приложения «Звукарик»

Примечание: при регистрации аккаунта и заполнении данных пользователь выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Подробная Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение доступны на официальном сайте.

5. Главный экран и навигация

После входа в систему открывается **Главный экран**. Отсюда можно быстро перейти в основные разделы сервиса:

- **Личный кабинет логопеда** (список учеников);
- **Режим «Обучение»** (каталог звуков и отдельные карточки звуков);
- **Режим «Тестирование»** (каталог звуков и проверка знаний);

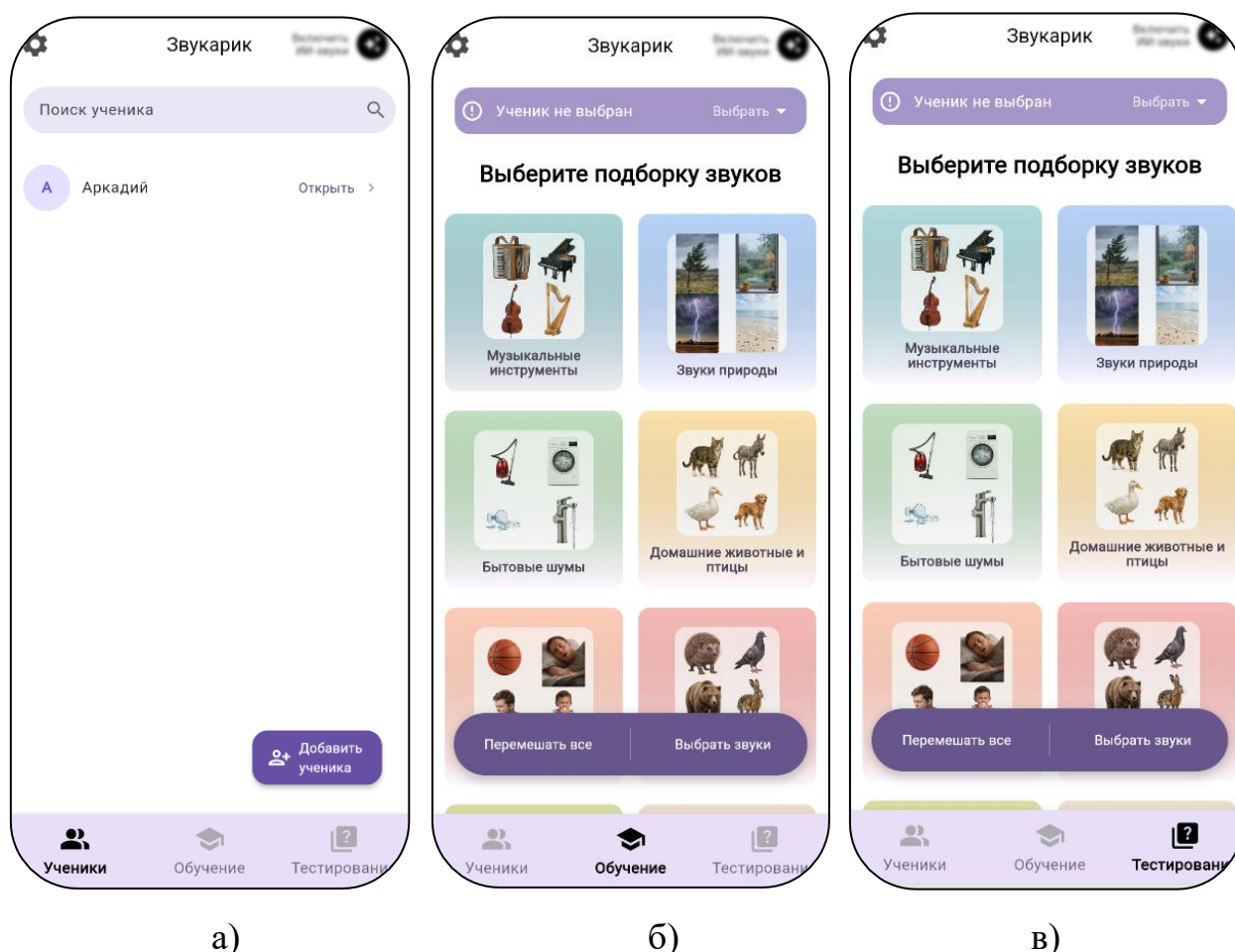


Рисунок 2 – а) экран Личного кабинета логопеда, б) Режим «Обучение», в) Режим «Тестирование»

В верхней правой части экрана (напротив иконки шестеренки/настроек) расположен переключатель **«Включить ИИ-звуки»**.

- Включение функции: переведите переключатель в положение «Вкл». При этом система начнет использовать синтезированные неречевые звуки, сгенерированные алгоритмами искусственного интеллекта.

- Выключение функции: переведите переключатель в положение «Выкл». В этом режиме приложение будет воспроизводить только стандартную (записанную) базу неречевых звуков.

Примечание: переключение режима доступно во время работы на Главном экране, а также перед запуском режимов «Обучение» и «Тестирование» для авторизованных пользователей.

6. Работа с Личным кабинетом логопеда

Раздел предназначен для организации индивидуальной работы с детьми на очных и онлайн-сессиях.

6.1. Добавление и выбор ученика

1. Перейдите в раздел **«Ученики»**, нажав соответствующую кнопку внизу экрана.

2. Чтобы добавить нового ребенка, нажмите кнопку **«+Добавить ученика»** и введите его имя и фамилию (при желании).

3. Из списка всех учеников нажмите на кнопку **«Открыть»**, чтобы перейти в личную карточку ученика.

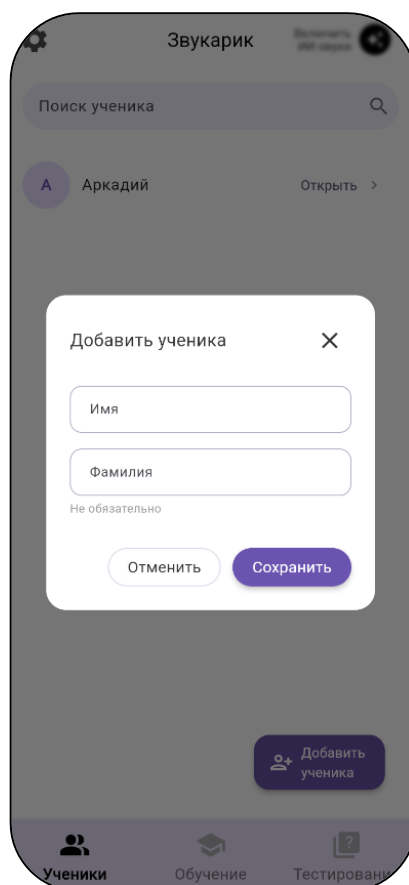


Рисунок 3 – Добавление ученика в личном кабинете логопеда


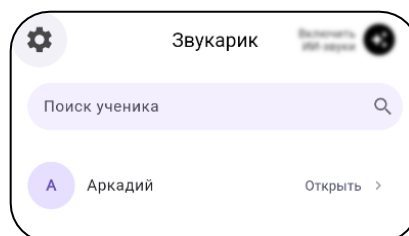


Рисунок 4 – Часть интерфейса с учеником и кнопкой «Открыть» для перехода в личную карточку ученика

6.2. Настройка персональных звуков для ученика

1. Выберите карточку ученика и нажмите **«Создать подборку»**.
2. Отметьте галочками те неречевые звуки, которые хотите отработать именно с этим ребенком.
3. Напишите название набора (подборки) звуков.
4. Нажмите **«Сохранить»** или **«Запустить»** для перехода к занятиям.

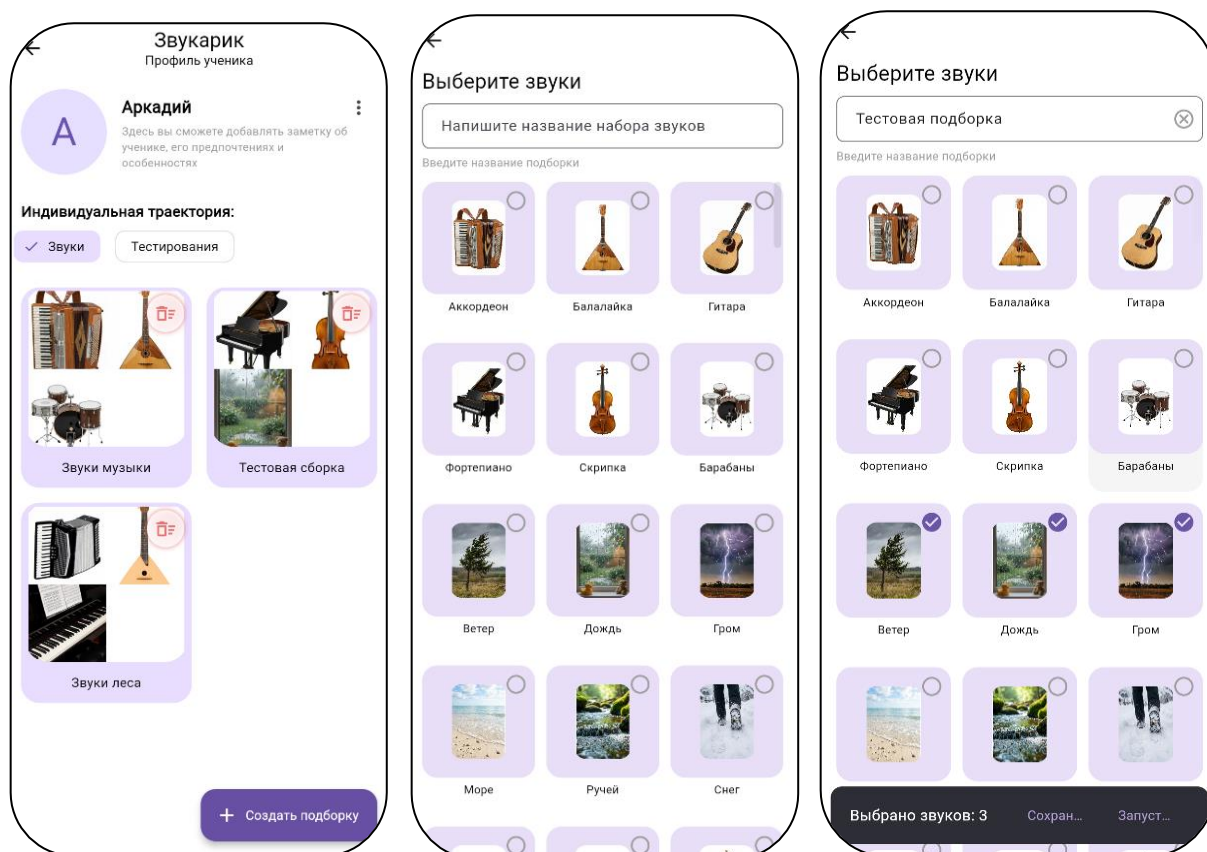

а)


б)

в)

Рисунок 5 – а) экран карточки ученика, б) выбора звуков, в) сохранение или запуск занятия

6.3. История выполнения тестирований

1. Выберите карточку ученика и нажмите на кнопку «Тестирования» рядом с кнопкой «Звуки».
2. Выберите в списке необходимое тестирование и нажмите на него.
3. На экране отобразится информация о тестировании и ответы ученика.

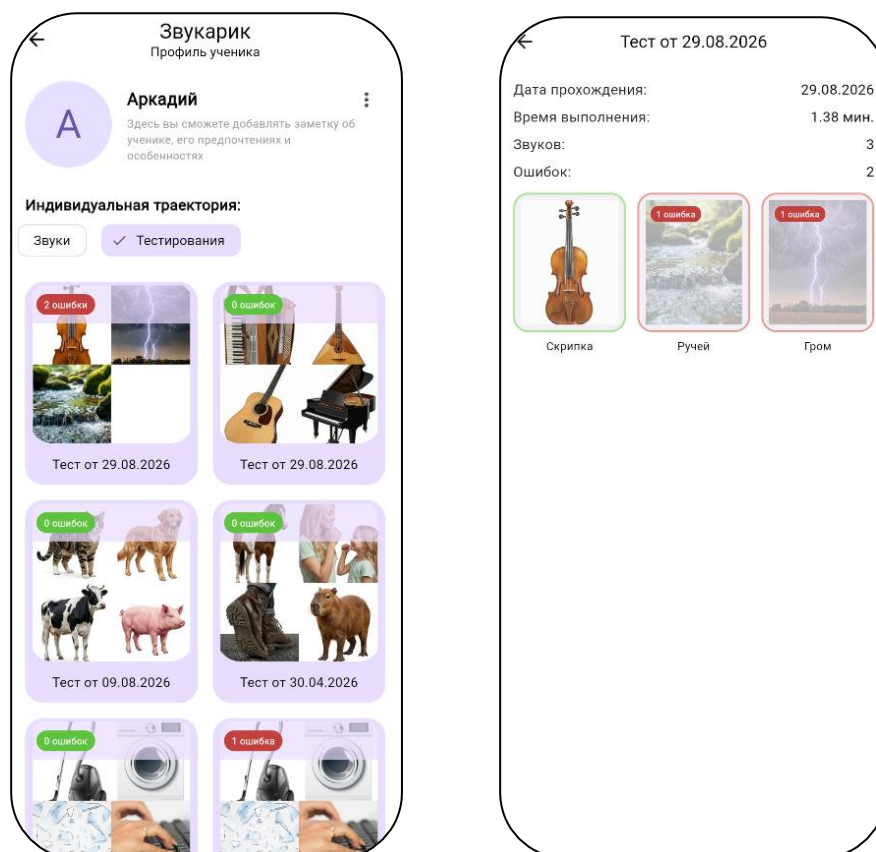

а)

б)

Рисунок 6 – а) экран списка пройденных тестирований ученика, б) информация о тестировании и ответы ученика

Обратите внимание: все вводимые персональные данные учеников (имя, фамилия, а также история и результаты прохождения тестирований) надежно защищены и хранятся в строгом соответствии с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных». Данные привязаны к вашему профилю и недоступны третьим лицам.

7. Режим «Обучение»

Режим «Обучение» позволяет ребенку прослушивать неречевые звуки, запоминать их и связывать с наглядными карточками/образами.

Перед началом прослушивания вы можете включить или отключить синтез ИИ-звуков с помощью переключателя "Включить ИИ-звуки" в верхней панели экрана.

7.1. Обучение по категориям (Каталог)

1. Нажмите кнопку «Обучение» внизу экрана.

2. Выберите одну из **9 доступных категорий** (например: «Животные», «Транспорт», «Бытовые шумы», «Музыкальные инструменты» и т.д.), нажав на нее.

3. Откроется экран с карточкой и кнопкой воспроизведения звука, перелистывайте карточки с помощью кнопок «Влево» и «Вправо».

4. Для переключения отображения в виде плиток или отдельными карточками в верхней части экрана имеется переключатель «Карточками/Плитками».

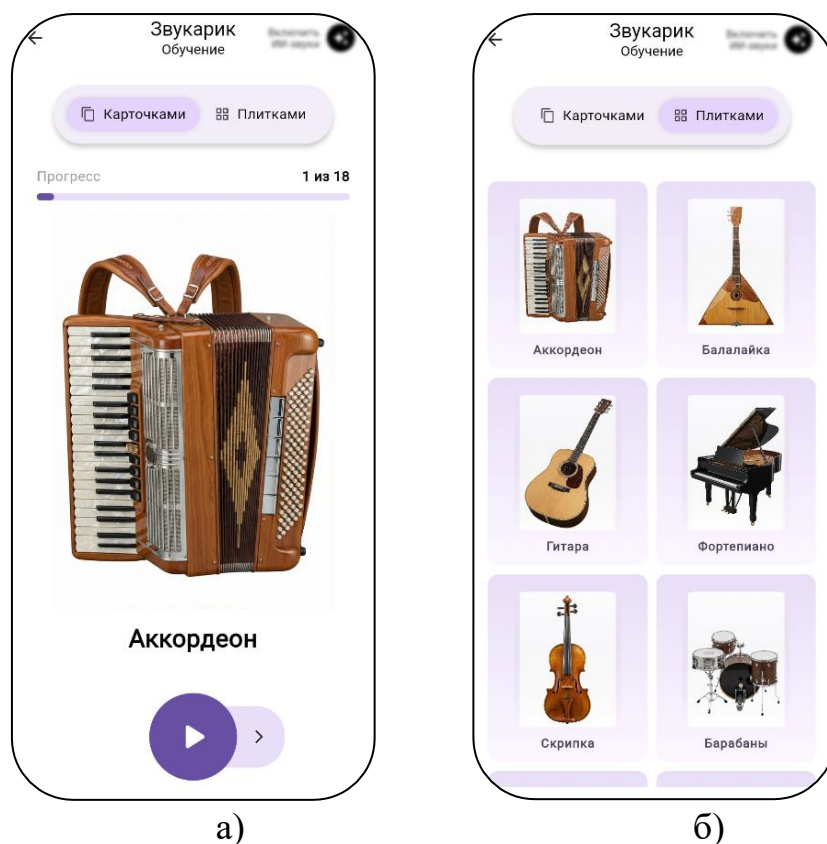


Рисунок 7 – а) экран отображения одной карточки звука (отображение «Карточками»), б) экран отображения сразу нескольких карточек (отображение «Плитками»)

7.2. Прослушивание 10 случайных звуков («Вперемешку»)

1. Нажмите кнопку «Обучение» внизу экрана, после чего нажмите «Перемешать все».

2. Система автоматически сформирует подборку из 10 разных неречевых звуков из всех категорий подряд.

7.3. Конструктор звуков

1. Нажмите кнопку **«Обучение»** внизу экрана, после чего нажмите **«Выбрать звуки»**.
2. Самостоятельно выберите любые звуки из разных категорий, которые вы хотите включить в текущее занятие.
3. Напишите название набора (подборки) звуков.
4. Нажмите **«Сохранить»** или **«Запустить»** для перехода к занятию.

8. Режим «Тестирование» и сохранение результатов

Режим позволяет проверить, насколько хорошо ребенок научился узнавать и различать неречевые звуки на слух.

8.1. Запуск тестирования

Перейдите в раздел **«Тестирование»** и выберите один из вариантов прохождения:

- По конкретной категории (из 9 доступных);
- 10 звуков вперемешку (случайная выборка из всей базы);
- Выбрав конкретные звуки;

Обратите внимание: если тумблер "Включить ИИ-звуки" активен, в тестовых заданиях используются звуки, сгенерированные ИИ.

8.2. Прохождение теста и фиксация результатов

1. Приложение воспроизводит неречевой звук.
2. Ребенок выбирает правильную карточку на экране.
3. При необходимости повторного прослушивания нажмите кнопку **«Слушать еще раз»**.
4. После прослушивания всех выбранных звуков отображается краткий результат правильных и неправильных ответов.

5. Для сохранения результатов убедитесь, что в верхней части экрана выбран нужный ученик (плашка „Ученик не выбран“ позволяет выбрать профиль из списка). Результат прохождения тестирования (количество правильных/неправильных ответов, дата, время прохождения) **автоматически сохраняется** в его личной карточке.

6. Логопед или родитель может в любой момент посмотреть динамику успеваемости ученика в его карточке (профиле).

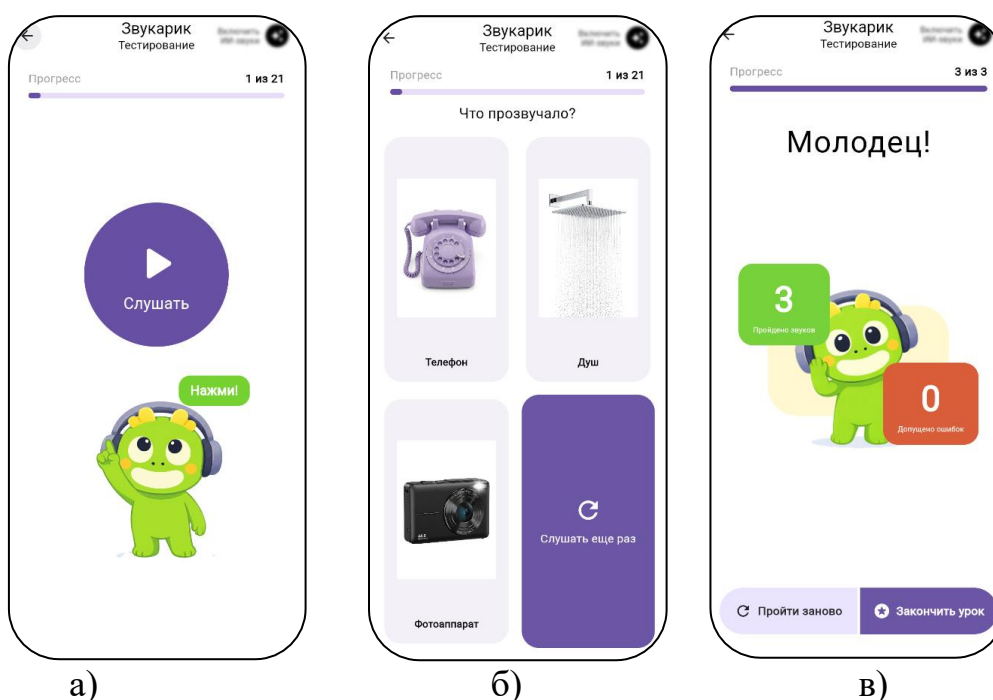


Рисунок 8 – а) экран воспроизведения звука, б) выбора варианта ответа, в) краткий результат тестирования

9. Что делать, если возникла ошибка или вопрос

- **Не слышно звук:** проверьте уровень громкости на смартфоне/компьютере, а также убедитесь, что отключен «Тихий режим» на устройстве.
- **Не сохраняются результаты ученика:** убедитесь, что вы выбрали профиль ученика *до* начала прохождения тестирования.
- **Проблемы с входом или авторизацией:** Проверьте подключение к сети Интернет. Если восстановить доступ не удастся, нажмите кнопку

«Забыл(а) пароль» или обратитесь в службу поддержки. **Техническая поддержка:** info@verbalaid.ru.

10. Правовая информация и контакты правообладателя

10.1. Правообладатель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРБАЛЭЙД»

Сокращенное наименование: ООО «ВЕРБАЛЭЙД»

ОГРН: 1257700431372

ИНН: 9709128462 / КПП: 770901001

Юридический адрес: 109147, гор. Москва, улица Марксистская, дом 20, стр. 8, помещение 1/1

10.2. Контактная информация

Официальный веб-сайт: <https://verbalaid.ru>

Служба технической поддержки: info@verbalaid.ru

10.3. Правовые документы и конфиденциальность

Использование программного обеспечения «Звукарик. Неречевые звуки» регулируется следующими документами:

- Пользовательское соглашение: <https://verbalaid.ru/legal/terms>
- Политика обработки персональных данных:

<https://verbalaid.ru/legal/privacy>

Все права на программное обеспечение и графические материалы принадлежат ООО «ВЕРБАЛЭЙД». Обработка персональных данных пользователей и сведений об учениках осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».